

Покрокова інструкція

Розтягуючий апарат для члена –
ЕКСТЕНДЕР НА ОСНОВІ СТЕРЖНІВ

PENIMASTER[®] PRO

Покрокова інструкція

Розтягуючий апарат для члена –
ЕКСТЕНДЕР НА ОСНОВІ РЕМЕНІВ



Поверніть стандартний клапан проти часової стрілки, щоб закрити його.



Нанесіть 3 - 4 краплі геля ProMaster на головку члена



Нанесіть 3 - 4 краплі геля ProMaster на внутрішню поверхню мембрани та шліза.




- Стисніть грушу **майже** повністю.
- **Вставте закритий** клапан в грушу у відповідності до розмітки на пластику (див. фото).




- Поверніть камеру та грушу в протилежному один від одного напрямку.
- Стисніть грушу **до кінця**.
- **М'яко** вдав'яйте головку в камеру.




Повільно розтисніть грушу. Це створить легкий вакуум, який втягне головку в камеру.
Порада: Якщо головка пеніса не зайшла в камеру повністю, перейдіть до кроку 7 і знову повторіть 4 і 6.

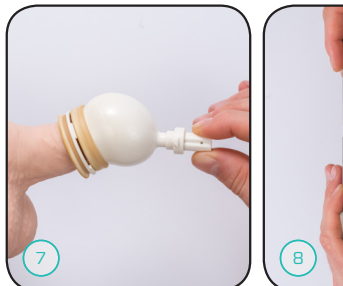


Поверніть грушу проти часової стрілки, щоб від'єднати її від камери. Клапан має бути закритим.

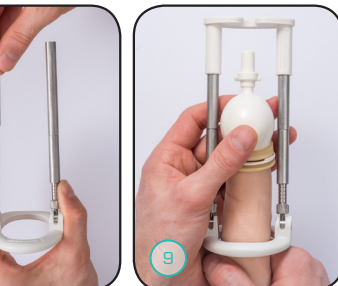


Зберіть систему стержнів. Визначте приблизну довжину екстендера (довжина вашого розтягнутого члена + 1,5 см).

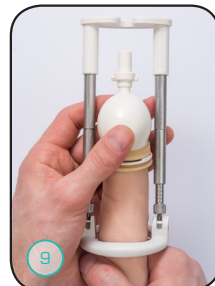

Введіть пеніс з надітою камерою в упорне кільце.

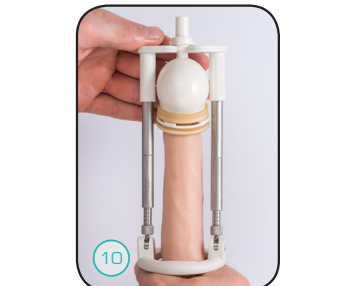

Стисніть подовжуючі стержні.
Обережно розтягніть член для того, щоб з'єднати камеру з стиковочним гніздом.
Контролюйте розтягування за допомогою пружинних вагів:
- Кожна насадка відповідає 230 грам.
- Для ослаблення натягування використовуйте більш короткі стержні.
- Для збільшення натягування використовуйте довгі стержні або різьбові гвинти.

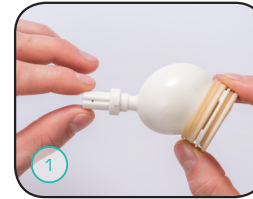

Поверніть стандартний клапан проти часової стрілки, щоб закрити його.

Зелена мембрана: Маленька головка члена
Жовта мембрана: Середня головка члена
Блакитна мембрана: Велика головка члена



Нанесіть 3 - 4 краплі геля ProMaster на головку члена.




Нанесіть 3 - 4 краплі геля ProMaster на внутрішню поверхню мембрани та шліза.



- Стисніть грушу **майже** повністю.
- **Вставте закритий** клапан в грушу у відповідності до розмітки на пластику (див. фото).




- Поверніть камеру та грушу в протилежному один від одного напрямку.
- Стисніть грушу **до кінця**.
- **М'яко** вдав'яйте головку в камеру.

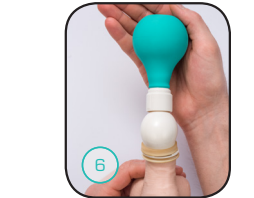


Повільно розтисніть грушу. Це створить легкий вакуум, який втягне головку в камеру.
Порада: Якщо головка пеніса не зайшла в камеру повністю, перейдіть до кроку 7 і знову повторіть 4 і 6.



Поверніть грушу проти часової стрілки, щоб від'єднати її від камери. Клапан має бути закритим.

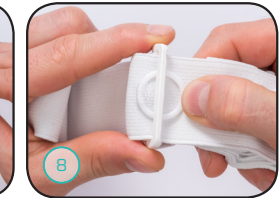

- Відрегулюйте довжину ремня відносно вашого тіла.
- Зменшення натягування відбувається шляхом подовження ремня.
- Збільшення натягування відбувається шляхом скорочення ремня по довжині.

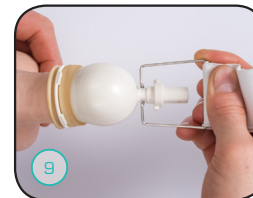

- З'єднайте камеру зі стиковочним гніздом.
- Потягніть ремінь для сцеплення.




Розташуйте член вздовж тіла з правої або лівої сторони.



- Протягніть ремінь за спиною та оберніть навколо талії.
- Зафіксуйте ремінь за допомогою зажиму на кільці або на самому ремні.



- Розташуйте член вгору.
- Ремінь протягніть через плече.

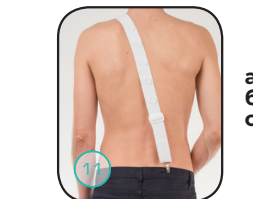

- Протягніть ремінь вздовж спини.
- Зафіксуйте ремінь за допомогою зажима на бруксах.



Сядьте на ступінь і оберніть ремінь навколо коліна.



Вільний кінець намотайте навколо натягнутої частини ремня.



Зафіксуйте ремінь за допомогою зажиму на кільці.